



Οδηγίες Χρήσης



Το κιτ περιλαμβάνει

ActFast γιλέκο neoprene - PVC Ασκός - Αεραγωγός -

10 αντικείμενα κατάποσης - Οδηγίες χρήσης - Τσάντα μεταφοράς/αποθήκευσης

www.firstaidshop.gr

Αγχιάλου 27, Κομοτηνή, 69100

Τηλ/Fax: 25310 23023 || Email: sales@firstaidshop.gr

Οδηγίες Χρήσης


Προορίζεται για χρήση υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών Α' Βοηθειών

Περάστε το γιλέκο πάνω από το κεφάλι σας και τραβήξτε τους ιμάντες στην μέση σας για να εφαρμόσει σωστά.

Χρησιμοποιήστε το μαξιλάρι στο πίσω μέρος για να εξασκηθείτε στα χτυπήματα στην πλάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: για προσομοίωση μόνο, μην χρησιμοποιείτε δύναμη

Ρίξτε ένα από τα αντικείμενα κατάποσης μέσα στον αεραγωγό

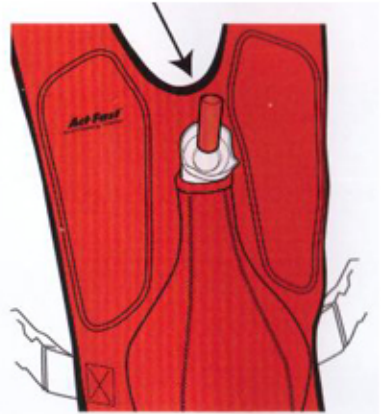

Τοποθετήστε τα χέρια σας στην σωστή θέση, ανάμεσα στον ομφαλό και τον θώρακα, ακουμπώντας τα ελαφρά στο γιλέκο.



Μετά κάντε μια γρήγορη ανοδική ώθηση για να βγει το αντικείμενο κατάποσης. Μην χρησιμοποιείτε δύναμη, δεν είναι απαραίτητο και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Η σωστή τεχνική θα έχει ως αποτέλεσμα το αντικείμενο να πεταχτεί από τον αεραγωγό, παρέχοντας τις σωστές γνώσεις για να γίνει σωστά η κίνηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: μην στοχεύετε τον αεραγωγό προς τα μάτια

Το γιλέκο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία θέσεων και στάσεων έτσι ώστε να δημιουργούνται ρεαλιστικά σενάρια, όπως: όρθια στάση, καθιστή στάση και ξαπλωτή στάση. Επίσης, επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να εξασκηθεί σε αυτό-διάσωση, χρησιμοποιώντας κάποιον πάγκο ή καρέκλα.

Οδηγίες Καθαρισμού

Από την εσωτερική πλευρά του γιλέκου, ελευθερώστε τους ιμάντες velcro και αφαιρέστε το PVC ασκό και τον αεραγωγό.

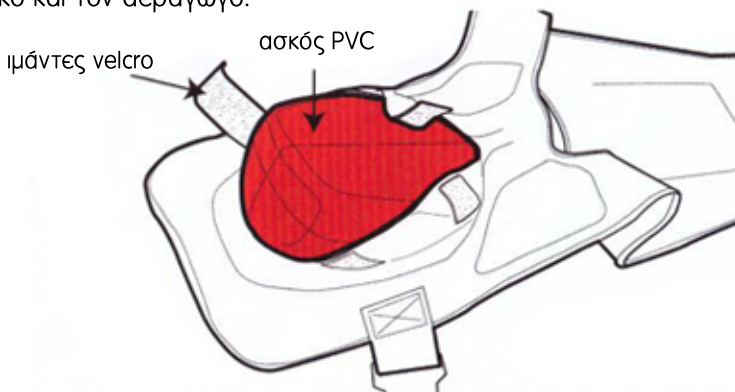

**Πλύντε το γιλέκο στο χέρι χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό.
Κρεμάστε σε εξωτερικό χώρο για να στεγνώσει**

Μπροστινό μέρος γιλέκου

Ο διάφανος
αεραγωγός
επιτρέπει στον
χρήστη να βλέπει
το αντικείμενο να
φεύγει

Μεγάλα κλίπ
“γρήγορης”
απελευθέρωσης με
προσαρμόσιμους
ιμάντες

Θωρακικό μαξιλάρι

Ειδικό μαξιλάρι που
διευκολύνει την
εκπαίδευση στα
χτυπήματα στην
πλάτη

Τοποθετήστε τα χέρια
σας πάνω στον ασκό

Ο προσομοιωτής
ομφαλού βοηθά
στην σωστή
τοποθέτηση των
χεριών

Πίσω μέρος γιλέκου

Διάφανη θήκη για
τις οδηγίες

