



Veinspy Συσκευή Ανίχνευσης Φλεβών

€450.00

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το Veinspy™ είναι μια φορητή συσκευή ανίχνευσης φλεβών για εύκολη οπτικοποίηση των φλεβών σε ενήλικες, παιδιά, ηλικιωμένους, παχύσαρκους και ασθενείς με σκούρο δέρμα που παρουσιάζουν δυσκολία στη φλεβική πρόσβαση.

Βασίζεται στην τεχνολογία εγκάρσιου φωτισμού: οι ακτίνες φωτός από έναν κυκλικό δακτύλιο LED διαπερνούν το δέρμα και λειτουργούν ως πηγή φωτός για βαθύ φωτισμό των υποδόριων ιστών.

Οι φλέβες στην φωτιζόμενη περιοχή απορροφούν το φως και γίνονται εμφανείς ως σκούρες γραμμές.

Η συσκευή Veinspy™ αποτελείται από δύο σύνολα έγχρωμων LED: το ένα σύνολο εκπέμπει πορτοκαλί φως, ιδανικό για επιφανειακές φλέβες, και το άλλο σύνολο εκπέμπει κόκκινο φως για τον εντοπισμό βαθύτερων φλεβών.

Πλεονεκτήματα του Veinspy™:

- Μειώνει τις πολλαπλές προσπάθειες παρακέντησης και βελτιώνει την επιλογή σημείου για εισαγωγή βελόνας.
- Δεν προκαλεί καθυστερήσεις στη θεραπεία λόγω δύσκολης φλεβικής πρόσβασης.
- Μειώνει τον πόνο του ασθενούς κατά την εισαγωγή της βελόνας.
- Αυξάνει την άνεση του ασθενούς και αποφεύγει τη δημιουργία αιματώματος.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το VeinSpy™:

1. Καθαρίστε την περιοχή του δέρματος του ασθενούς με αντισηπτικό μαντηλάκι.
2. Εισάγετε το VeinSpy™ στη μίας χρήσης θήκη και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
3. Μετακινήστε το VeinSpy™ μπρος-πίσω για να έχετε καθαρή εικόνα της συγκεκριμένης φλέβας.
4. Μετά την οπτικοποίηση της φλέβας, μετακινήστε τη συσκευή έτσι ώστε να γίνει εύκολα η εισαγωγή της βελόνας.
5. Πιέστε απαλά το VeinSpy™ στη φλέβα και, μέσω του ανοιχτού άκρου της συσκευής, εισάγετε τη βελόνα στη φλέβα.

The document was created on: Ιανουάριος 20, 2025